



スノアサークル

目次


1 はじめに	32
2 本製品について	32
3 電源オン/オフについて	34
4 バッテリーについて	35
5 アプリのダウンロード	36
6 Bluetooth接続(ペアリング)	36
7 アプリ機能紹介	37
8 装着方法	38
9 FAQよくある質問	39
10 問題が発生したら	40
11 使用上の注意	41
12 保証について	41
13 アフターサービス	42

1.はじめに

スノアサークル スリープブレス(以下「本製品」)は、自宅での呼吸を監視(モニタリング)するために特別に設計されたスマートウェアラブルデバイスです。呼吸、いびき、睡眠時間、寝姿勢、等データをリアルタイムでモニタリングし、睡眠の質を向上させるためのサポートをします。本製品があなたの睡眠改善に役立つことを願っております。

2.本製品について

本製品には、製品本体(マスク含む)、ストラップ、およびマグネット式充電ケーブルが同梱されています。

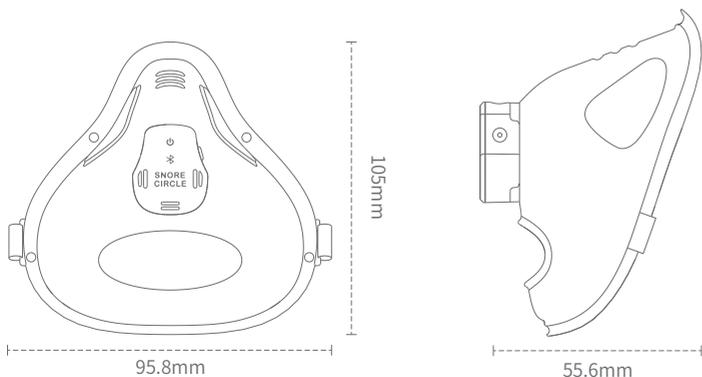

製品仕様

【製品名】：スノアサークルスリープブレス

【ブランド】：スノアサークル

【型番】：YS20

【本体サイズ】：29.4*24.5*11.5MM

【マスクサイズ】：105.0*95.8*55.6MM

【重量】：18.5 g

【バッテリー】：3.7V/55mAh

【連続稼働時間】：About 16 hours

【同梱物】：製品本体(マスク含む)×1、ユーザーマニュアル×1、


クイックユーザーガイド×1、充電ケーブル×1、白ストラップ(S)×4、白ストラップ(M)×4、白ストラップ(L)×4。

3.電源オン/オフについて

電源オン

電源をオンにするには、本体電源スイッチを3秒間押してください。

電源を入れると、電源ランプが10秒間点灯し、Bluetoothランプが10秒間点滅した後、消灯します。

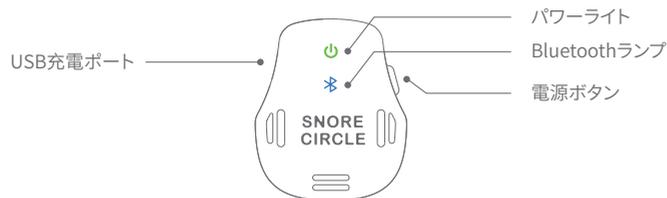

電源オフ

電源をオフにするには、電源スイッチを3秒間押してください。

本体の電源が正常にオフになりましたら、電源およびBluetoothランプが消灯します。

- (1) 電源LEDインジケータは10秒後に自動的に消灯します。(省電力のため) 電源ボタンを押すと、再びLEDオンになります。
- (2) 電源ボタンを押すことで製品本体の状態を確認できます。
LEDが点灯している場合は、本体が作動していることを表します。

4.バッテリーについて

(1) バッテリー残量の確認

バッテリー残量の確認は電源をオンの状態で電源スイッチを押してください。

電源LEDが黄色の場合、バッテリー残量が不足しています、速やかに充電してください。



電源LEDが緑色の場合、バッテリー残量は十分です。



詳細なバッテリー残量を確認するには本体をSleepbreathアプリとペアリングし、モニタリング画面にて確認してください。

- (2) 本製品は充電式リチウムポリマー電池を使用しています。
- (3) バッテリーが完全に充電されるまで約2時間かかります。
- (4) 充電するにはマグネット式充電ケーブルをUSBポートに接続してください。

充電中は製品本体電源LEDインジケータが点滅します。充電が完了されるとLEDインジケータが点灯したままになります。

5.アプリのダウンロード

アプリのダウンロード方法:

- (1) iPhone: App StoreでSleepbreathを検索し、アプリをダウンロードしてインストールしてください。
- (2) Android: Google PlayでSleepbreathを検索し、アプリをダウンロードしてインストールしてください。
- (3) QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。



sleepbreath

6. Bluetooth接続 (ペアリング)

- (1) Sleepbreathアプリを開き、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
- (2) 電源を入れるとBluetoothインジケータが10秒間点滅し、ペアリングの準備ができたことを示します。
- (3) スマートフォンを本体に近づけ、アプリの指示に従ってデバイスをペアリングしてください。Bluetoothインジケータが点灯している場合は、ペアリングが成功したことを示します。
- (4) 製品本体が見つからない場合は、電源がオンになっていることを再度確認し、スマートフォンに近づけてからもう一度お試しください。アプリの指示に従って、デバイスをペアリングしてください。

製品本体をアプリとペアリングすると、本体データを表示できます。

- (1) アプリはiOS8.0以降またはAndroid4.3以降のスマートフォンのみ対応です。
- (2) スマートフォンOSのバージョンにより、一部Androidスマートフォンでは、アプリに現在地へのアクセスを許可する必要があります。また、デバイスを検索するには、Bluetoothへのアクセスが必要です。
- (3) ペアリングが必要なのは1回だけです。ペアリングが解除されない限り、次回使用以降、自動的にペアリングします。
- (4) 本体の電源を入れスマートフォンに近づけると、本体は自動的にアプリと再接続します。

7. アプリ機能紹介

- (1) スマートフォンのBluetoothが有効になっており、製品本体の電源がオンになっていることを確認してください。
- (2) Sleepbreathアプリを開き、スマートフォンを製品本体に近づけます。
- (3) 「ペアリング」をクリックして接続本体とアプリを接続します。
- (4) 製品本体の状態が「接続済み」になると、睡眠のモニタリングを開始できます。
- (5) モニタリング画面には、呼吸やいびきなどの睡眠データがリアルタイムで表示されます。
- (6) レポート画面では、睡眠の質と統計分析を表示します。詳細な睡眠データは、本体データに基づき分析されます。
- (7) 技術用語の定義はデバイス画面で確認できます。

8.着用方法

本製品には3種類のストラップが含まれています。ご自身に合ったタイプをお選びください。ストラップが非常に緩んでいるか、きつい場合、モニタリングデータが不正確になります。ストラップは着用時に少しびんと張る必要があります。

(1) 同じ長さの付属ストラップを2本選び、マスクの両側にある丸い穴に通してください。ストラップの端を平らにし本体から外れないようにしてください。



(2) 白いストラップを耳にかけ、マスクを前方に引っ張ってください。鼻先がマスクの上部からの約指3本程度離れている状態が推奨です。



(3) マスクをしっかりと顔にフィットさせ、モニタリングを開始してください。



9.FAQよくある質問

(1) 本製品は使用時アプリに接続する必要がありますか？

A: はい、本製品は使用中にアプリに接続する必要があります。本アプリは、モニタリングされたデータをリアルタイムで表示・保存するため、いつでも過去の睡眠データを確認できます。一度ペアリングをすると、電源を入れるだけで本製品は自動的にスマートフォンと接続します。

(2) アプリはすべてのスマートフォンに対応していますか？

A: このアプリは、iOS8.0以降またはAndroid4.3以降のスマートフォンにのみ対応です。

(3) 電源を入れた後、電源LEDインジケータは点灯したままですか？

A: いいえ。製品本体の電源がオンになると、電源LEDインジケータとBluetoothインジケータは約10秒間点灯し、その後自動的に消灯します。電源ボタンを押すことで、電源インジケータとBluetoothインジケータをさらに10秒間点灯することができ、本体のオン・オフ状態が確認できます。

(4) デバイスが機能しているかどうかはどうすればわかりますか？

A: アプリのモニタリング画面は、デバイスが動作しているときにリアルタイムデータを表示します。

(5) 製品本体の充電にはどのくらいの時間がかかりますか？また、完全に充電されてからどのくらいの時間使用できますか？

A: 製品本体を完全に充電するには約2時間かかります。充電完了後、通常最大16時間使用できます。本体を1日8時間以上使用する場合、1日1回充電することをお勧めします。

(6) 最適なストラップの長さを選ぶにはどうすれば良いでしょうか？

A: 本製品は長さの異なる3種類のストラップを同梱しております。推奨するストラップの長さは、マスク装着後前方に引っ張った際、鼻先がマスクの上部から約指3本ぐらい離れている状態です。本製品ご使用后、睡眠データ上マスクが脱落した時間が長いと表示された場合、一つ小さいサイズのストラップに変更し、再度お試しください。

(7) アプリはバックグラウンドで実行できますか？

A: はい、できます。ただし、バックグラウンドでの実行は、リアルタイムのモニタリングが他のアプリによって中断される可能性が高まるためお勧めいたしません。

(8) なぜ本製品の理想的な動作環境温度は25°Cなのでしょう？

A: 本製品は口と鼻からの息を感知する温度センサーを搭載しています。温度センサーは極めて敏感なため、環境温度が睡眠データの正確性に影響を及ぼす場合があります。

10.問題が発生したら

(1) 製品本体の電源が入らない

USBケーブルを使用して製品本体を充電してみてください。問題が解決しない場合は、製造/販売元にお問い合わせしてください。

(2) 充電ができません

マグネット式充電ケーブルが正しく接続されていること、および電源アダプタが機能していることを確認してください。問題が解決しない場合は、製造/販売元にお問い合わせしてください。

(3) アプリでリアルタイムモニタリングデータが見られません。

本体を再起動し、アプリと再度ペアリングしてください。

本体の再起動方法: 電源ボタンを3秒間押し本体電源をオフにします。もう一度3秒間押しオンにした後、アプリに再接続してください。

アプリの再起動方法: アプリを強制終了し、再度開いてください。

(4) 製品本体をアプリに接続できない

製品本体とスマートフォンのBluetoothを再起動して、再度接続をお試しください。

11.使用上の注意

- (1) 本製品の推奨使用環境温度は25°C、保管温度は-10°C~50°Cです。
 - (2) 製品本体がエアコン、扇風機など直接風の当たらない場所で使用してください。
 - (3) 本製品を火、電気ヒーター、ストーブ、電子レンジ、オープンなどの近く、または温度が高すぎる場所に置かないで下さい。
 - (4) 本製品に強い衝撃や振動を与えないで下さい。
 - (5) 本製品に薬品や洗剤などは使用しないで下さい。
 - (6) 製品にはリチウムポリマー電池が内蔵されておりますので、ご自身で解体や分解、交換をしないで下さい。
 - (7) 火の中に本製品を入れると爆発する可能性があります。
 - (8) 本製品は玩具ではありません。誤使用やその他の危険を防ぐため、お子様の手の届かないところに保管してください。
 - (9) 本製品は充電中できません。
 - (10) 充電にご使用するアダプターまたはその他電源出力は5ワット未満、及び地域の安全基準に準拠している必要があります。
 - (11) 充電が終了したら速やかに充電ケーブルを外してください。
 - (12) 充電は気温5°C~45°Cの範囲内で行ってください。
 - (13) 本製品および付属品は耐用年数に達したとき、地域の法律および規制に従って廃棄してください。
 - (14) 本製品の使用中に不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
 - (15) 本製品を使用する前に、必ず説明書をよくお読みください。
- 本製品は医療機器ではありません。睡眠データは個人の参照用とし、病気を診断する目的ではありません。

12.保証について

- (1) 本製品は、購入日から1年間の保証が適用されます。
- (2) 人為的な故障、損傷は保証の対象外となります。